

患者搬送補助用具



Bタイプ（上半身安定支持型）取扱説明書

大事な人を
守りたい。



この度は、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、
本書をよくお読みの上で使用願います。

製品特徴

《消防署他》

救急車搭載のストレッチャーから現場への二次搬送

既設のストレッチャーではキャスター式の為、平地のみの移動しかできないが、階段や足場の悪い現場からストレッチャーまでを使用することで患者を安定して搬送することができます。

《スポーツ施設》

トレーニングルーム、プールサイド、更衣室から救護室への搬送

通常の担架では収納スペースに限りがあり、出し入れに手間が掛かるがコンパクトで収納や出し入れも簡単のため、必要な時に素早く取り出し、搬送することができます。

製品仕様


- サイズ：縦約 143cm× 横約 49cm× 厚さ 3mm
グリップ部 18.5mm
- 重さ：約 1900g
- 素材：ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、リベット
- 使用適正体重：100kg 迄

★安全にご使用頂くために以下の注意をお守りください。

- ・火のそばにおかないでください。**変形、破損**の原因となります。
- ・使用対象者重量は **100kg** 以内で使用ください。
- ・PP 素材のため、下記の症状が見受けられる場合、販売店にお問い合わせください。
- ・劣化基準、①形状の部分的亀裂（決裂）状態が見受けられる場合
② PP 素材の硬化、色素変化等が見受けられる場合
- ・水平な場所で使用してください。（坂道、階段では使用できません）
- ・必ず 2 名以上で使用してください。
- ・当社商品をご使用時でのけが、体調の悪化、事故等に関する、一切の保証は致しかねます。

<保管上の注意>


- ・直射日光の当たる所に保管しないで下さい。
- ・収納時は**水平若しくは吊り下げ**保管にし、変形させた状態では保管しないで下さい。

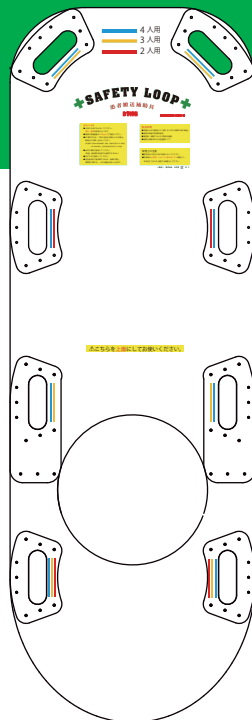

Safety Loop B タイプ 使用方法


1

使用対象者が水平な場所で
仰向けになっている事を
確認します。
本製品の平らになっている
部分を上にして使用対
象者の背中中に差し込みます。

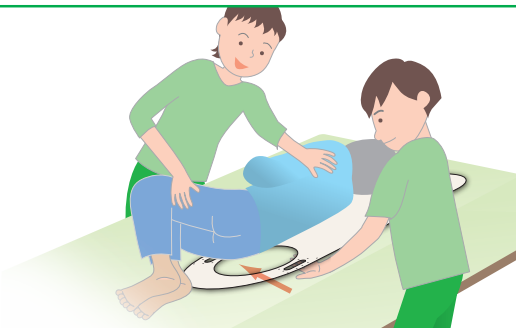

2

持ち上げるときは、
必ず2名以上で使用対象者の両側
から両手でグリップの中に
手を差し込みます。
差し込み方は図を参考に
してください。

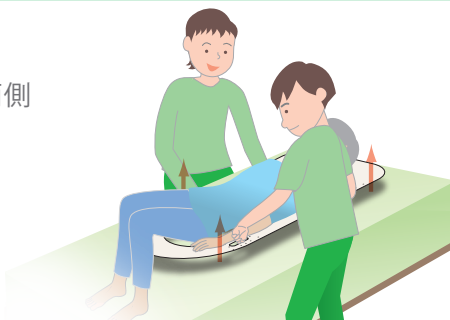


3


そのまま持ち上げ、
目標地点まで移動し、
ゆっくり本製品から
着地させます。



4

本製品を背中から
抜き出し、
再び使用対象者を
仰向けの状態にします。

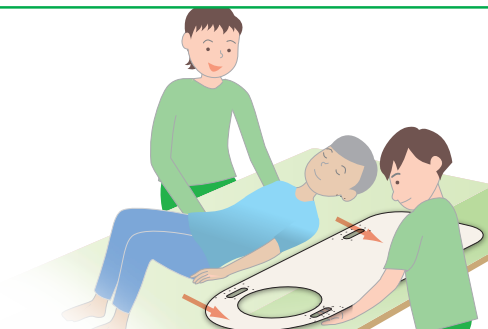

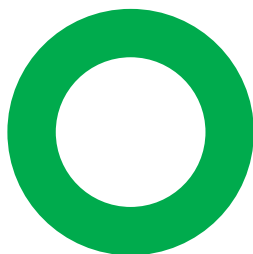

Safety Loop®
Transport equipment

<http://safety-loop.com>



株式会社 **光文堂**

■ 福祉安全用品事業本部 営業所／東京 大阪 名古屋 広島 九州
広島県呉市川尻町東 3-10-45
TEL (0823) 87-3176 FAX (0823) 87-3365
<http://corp.koubundo.co.jp>