# 患者搬送補助用具



# Sタイプ(分離型)取扱説明書





### この度は、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、 本書をよくお読みの上ご使用願います。

製品 特徴

#### 《消防署他》

救急車搭載のストレッチャーから現場への二次搬送 既設のストレッチャーではキャスター式の為、平地のみの移動しかできないが、 階段や足場の悪い現場からストレッチャーまでを使用することで患者を安定し

て搬送することができます。

《スポーツ施設》

トレーニングルーム、プールサイド、 更衣室から救護室への搬送

通常の担架では収納スペースに限りがあり、出 し入れに手間が掛かるがコンパクトで収納や出 し入れも簡単なため、必要な時に素早く取り出 し、搬送することができます。



製品 什様

- ●サイズ: 縦約 65cm× 横約 54cm× 厚さ 2mm グ<u>リップ部 18.5mm</u>
- ●重さ:555a
- ●素材:ポリプロビレン、ポリ塩化ビニル、ステンレス、リベット
- ●使用適正体重:100kg 迄 ●付属品:グリップサポート×2個

#### <使用上の注意>

#### ★安全にご使用頂くために以下の注意をお守りください。

- ・火のそばにおかないでください。変形、破損の原因となります。
- ・硬い材質の上では使用しないでください。
- ・使用対象者重量は 100kg 以内で使用ください。
- ・PP 素材のため、下記の症状が見受けられる場合、販売店にお問い合わせください。 ・劣化基準、①形状の部分的亀裂(決裂)状態が見受けられる場合 ② PP 素材の硬化、色素変化等が見受けられる場合
- ・水平な場所で使用してください。(坂道、階段では使用できません)
- <保管 Lの注意> ・直射日光の当たる所に保管しないで下さい。
  - ・収納時は水平若しくは吊り下げ保管にし、変形させた状態では保管しないで下さい。

- Safety Loop S タイプには取り外し可能な連結金具が装備されています。
- ・使用時には必ず連結金具の凹凸部が下になるようにし使用してください。
- ・使用時には必ず連結金具がしっかりと固定されていることを確認してください。

連結金具について



⇩下方向⇩



取り外し時




連結時

# Safety Loop S タイプ 使用方法

1

確認します。 本製品の連結金具を外し、 使用対象者の背中にから 回転させるように差し込みます。

使用対象者が水平な場所で 仰向けになっている事を

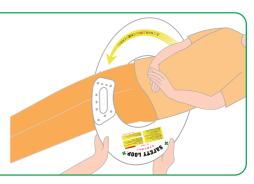

2

本製品の連結金具を連結させ、 必ず2名以上で使用対象者の 両側から片手で グリップ部を持ち、 片手で上半身を支えながら 持ち上げます。



3

そのまま目標地点まで移動し、 ゆっくり本製品から 着地させます。



4

状態にします。 本製品の連結金具を取り外し、 背中から回転させるように 抜き出します。

使用対象者を仰向けの





http://safety-loop.com



■ 福祉安全用品事業本部 営業所/東京 大阪 名古屋 広島 九州 広島県呉市川尻町東 3-10-45 TEL(0823)87-3176 FAX(0823)87-3365 http://corp.koubundo.co.jp